

yellowRIGID TAPE

TAŚMA DO TAPINGU SPORTOWEGO, KLEJ NAKŁADANY
WZDŁUŻNIE - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS

Taśma wykonana z bawełny, pokryta hipoalergicznym klejem
Klej nałożony wzdużnie, naprzemienne ułożenie pasów pokrytych klejem i tych bez kleju tworzą rowki, które ułatwiają przepływ potu i wody zmniejszając wrażliwość aplikacji na ich występowanie i zwiększając jej odporność na warunki środowiska

Taśma odporna na rozciąganie

Różne szerokości taśmy pozwalają na jej wygodne zastosowanie na stawach różnej wielkości (np. stawy palców, staw skokowy)

Ząbkowane brzegi ułatwiają odrywanie kawałka taśmy odpowiedniej długości, nie ma potrzeby korzystania z nożyczek

Dostępne kolory: biały

Dostępne rozmiary: 2,5cm x 9,1m; 3,8cm x 9,1m; 5cm x 9,1m

Produkt jednorazowego użytku

Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE

Prewencja kontuzji podczas aktywności sportowej

Zabezpieczenie stawu przed nadmierną ruchomością, mogącą pogorszyć stan po urazie, pozwalając jednocześnie na kontynuowanie uczestnictwa w treningu/zawodach

Ochrona miejsc narażonych na otarcia



INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

- Należy odpowiednio dobrać szerokość taśmy do miejsca aplikacji.
- Jeśli okolica ciała jest podatna na uszkodzenia naskórka, wrażliwa lub owłosiona, przed zastosowaniem taśmy należy zabezpieczyć ją podkładem pod taping.
- Jeśli nie stosuje się podkładu, w celu odtuszczenia skóry w miejscu aplikacji można przetrzeć ją gazikiem nasączonym alkoholem.
- Jeśli skóra była odtuszczana, przed aplikacją taśmy musi zostać dobrze osuszona.
- Wyjąć taśmę z opakowania
- Z rolki okleić odcinek odpowiedniej długości i oderwać go lub odciąć przy pomocy nożyczek.
- Przykleić w miejscu aplikacji bezpośrednio do skóry lub do podkładu piankowego.
- Tworząc oklejenie wokół kończyn nie należy owijać ich taśmą, tylko tworzyć osobne pętle z pojedynczych odcinków taśmy.
- Skontrolować, czy oklejenie nie jest zbyt ciasne i nie występują cechy niedokrwienia.
- Jeżeli taśma zacznie się odklejać lub pojawią się cechy zanieczyszczenia przy warstwie klejącej, należy wymienić ją na nową, ponieważ przestanie spełniać swoją rolę stabilizacyjną.
- Oklejenie należy ściągnąć bezpośrednio po zakończeniu aktywności, na czas której zostało stworzone.
- Aby usunąć taśmę można odklejać kolejne jej elementy lub rozciąć całość aplikacji uważając, żeby nie uszkodzić skóry znajdującej się pod oklejeniem.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Wyrób jednorazowego użytku. Ponowne użycie może zagrazać zdrowiu lub życiu.

W razie wystąpienia objawów alergii lub podrażnienia skóry należy usunąć taśmę z ciała.

Miejsce oklejenia należy obserwować, jeśli pojawią się cechy niedokrwienia takie jak: bladeść, czy zasinienie należy usunąć taśmę i ponownie wykonać oklejenie zmniejszając siłę owinięcia taśmy wokół ciała.

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek.

Zakładając opatrunek należy przestrzegać zasad higieny.

Produkt należy chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura jest utrzymywana w przedziale od +5 do +30 °C, a wilgotność od 30% do 80%.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

	nazwa i adres wytwórcy
	znak CE
	numer LOT określający numer partii produkcyjnej
	numer katalogowy wyrobu
	wyrób niesterylny
	wyrób jednorazowego użytku
	data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD
	wyrób nie zawiera lateksu
	przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi
	przechowywanie: chronić przed wilgocią
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	wilgotność względna przechowywania
	opakowanie nadające się do recyklingu

REF	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE KARTON
YRT-2591-W	2,5cmx9,1m	12 szt.	30 x 12 szt.
YRT-3891-W	3,8cmx9,1m	6 szt.	30 x 6 szt.
YRT-591-W	5cmx9,1m	6 szt.	30 x 6 szt.