

yellowTAPE

TAŚMA DO KINESIOTAPINGU - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS

- ▶ Taśma bawełniana, rozciąga się do ok. 140% swojej długości początkowej, zapewnia dostęp powietrza do skóry
- ▶ Akrylowy, bezlateksowy, nałożony faliście klej
- ▶ Może być noszona przez kilka (3-7) dni, o ile nie ulegnie uszkodzeniu lub odklejeniu
- ▶ Taśma naniesiona na papier chroniący warstwę klejącą z ok. 10% rozciągnięciem początkowym
- ▶ Dostępne rozmiary: 5cm x 5 m; 7,5cm x 5 m
- ▶ Produkt ofoliowany, folia zachodzi na brzegi taśmy chroniąc przed uszkodzeniem i zabrudzeniem warstwy klejącej
- ▶ Produkt jednorazowego użycia
- ▶ Produkt niejąłowy

ZASTOSOWANIE

- ▶ Wyrób służy do wykonywania oklejeń zgodnie z zasadami techniki kinesiotalpingu (plastrowania dynamicznego)
- ▶ Kinesiotalping to metoda bezinwazyjnego leczenia skutków zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, urazów układu ruchu, obrzęków, korekcji wad postawy
- ▶ Zapewnia lepsze odżywienie tkanek i ich szybszą regenerację, poprawę biomechaniki ruchu bez zmniejszenia zakresu ruchu w stawach
- ▶ Działanie na receptory czuciowe w skórze wpływa na odczucia bólowe



INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Należy odpowiednio dobrać szerokość taśmy do miejsca i rodzaju aplikacji.
2. Odciąć ustaloną długość taśmy z rolki, pamiętając o jej elastyczności i właściwym dla danego rodzaju aplikacji rozciągnięciu.
3. Przyciąć taśmę w wybrany kształt (I, Y, X, wachlarz).
4. Aby zminimalizować ryzyko odklejania się aplikacji od ciała zaokrąglij brzegi taśmy.
5. Jeśli część ciała, która ma być oklejana jest mocno owłosiona, zaleca się zgolenie włosów, aby zwiększyć przyleganie taśmy.
6. Oczyszczyć i odłuszczyć, a następnie osuszyć miejsce aplikacji.
7. Przykleić taśmę zgodnie z zasadami techniki kinesiotalpingu przekazanymi przez specjalistę (z odpowiednim rozciągnięciem taśmy, z początkiem i końcem oklejania we właściwych punktach anatomicznych).
8. Początek i koniec oklejania powinien zawsze być przyklejany bez napięcia, aby zapewnić stabilne mocowanie taśmy do ciała
9. Gotową aplikację należy delikatnie potrząść, aby pod wpływem wytworzonego przez tarcie ciepła aktywował się klej.
10. Aplikację powinno się utrzymywać na ciele od 3 do 7 dni.
11. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnień skóry należy usunąć taśmę.
12. Aby usunąć taśmę należy odkleić jeden z jej brzegów, a następnie ciągnąć dalszy fragment taśmy wzdłuż kierunku rośnięcia włosów, drugą ręką przytrzymując skórę.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- ▶ Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą.
- ▶ Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- ▶ W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.
- ▶ Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- ▶ Wyrób jednorazowy, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
- ▶ Wyrób niesterylny, nie stosować bezpośrednio na rany i uszkodzony naskórek.
- ▶ Podczas aplikacji taśmy należy przestrzegać zasad higieny.
- ▶ Obserwować miejsce aplikacji i usunąć taśmę jeśli doszło do jej zabrudzenia lub uszkodzenia. Taśmę chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest temperatura w przedziale od +5 do +30 °C, a wilgotność od 30% do 80%.

REF	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE KARTON
YT-55-Y	5 cm x 5 m	żółty	1 szt.	144 szt.
YT-55-S	5 cm x 5 m	cielisty	1 szt.	144 szt.
YT-55-X	5 cm x 5 m	czarny	1 szt.	144 szt.
YT-55-P	5 cm x 5 m	różowy	1 szt.	144 szt.
YT-55-B	5 cm x 5 m	niebieski	1 szt.	144 szt.
YT-55-4	5 cm x 5 m	1 x czarny, 1 x cielisty 1 x różowy, 1 x niebieski	4 szt.	36 x 4 szt.
YT-755-X	7,5 cm x 5 m	czarny	1 szt.	96 szt.
YT-755-S	7,5 cm x 5 m	cielisty	1 szt.	96 szt.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

	nazwa i adres wytwórcy
	znak CE
	numer LOT określający numer partii produkcyjnej
	numer katalogowy wyrobu
	wyrób niesterylny
	wyrób jednorazowego użytku
	data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD
	wyrób nie zawiera lateksu
	przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi
	przechowywanie: chronić przed wilgocią
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	wilgotność względna przechowywania
	opakowanie nadające się do recyklingu